


Setup numérique

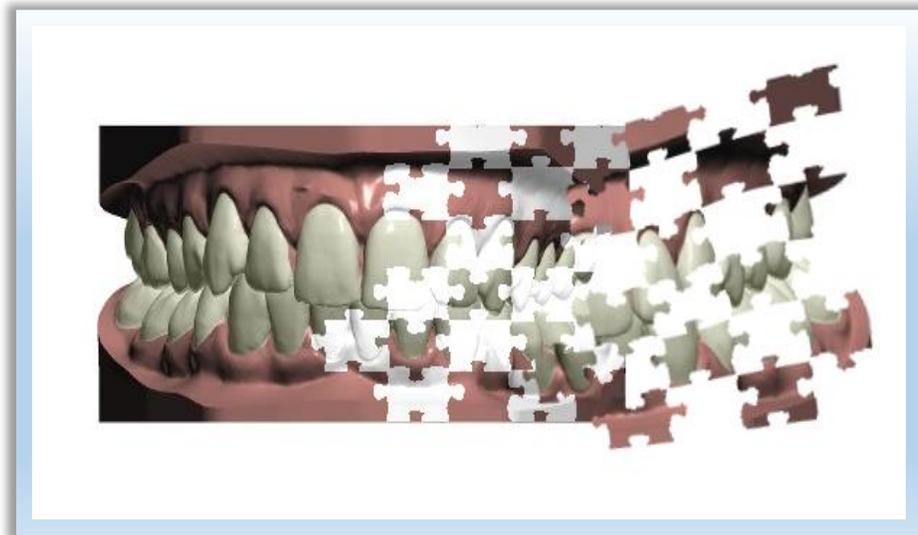

Notice

Tarifs

CGV

Présentation

Nous réalisons un setup numérique à partir d'empreinte en silicone ou numérique sous format **STL**, d'un enregistrement de l'occlusion, de la prescription générale et des détails que vous nous indiquez dans le bon de commande nous réalisons un Setup numérique avec le logiciel **OrthoAnalyser®**.

Les photos intrabuccales (face, profil droit et gauche, occlusale maxillaire et mandibulaire) et exobuccales (face, face avec sourire et profil) doivent être fournies sous format **JPEG**.

Nous vous transmettons ensuite les vues dynamiques et le récapitulatifs des mouvements exécutés dent par dent en vous proposant le nombre de séquences et les étapes nécessaires à sa bonne exécution.

Pour une bonne prévisibilité dans la réalisation des mouvements composant le Setup, il est nécessaire de regrouper certains de ces mouvements en séquence.

Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de modifier ces éléments avant la validation finale.

Après votre validation, nous vous adressons un lien de téléchargement pour recevoir l'ensemble des fichiers **STL** des arcades dentaires correspondantes à toutes les étapes du traitement.

Vous pouvez ensuite imprimer ou nous demander d'imprimer ces arcades pour fabriquer vos aligneurs.

Indication

Nous recommandons pour le moment notre solution thérapeutique pour les traitements pouvant se faire sur une durée maximum de 12 mois (en équivalent temps de traitement multiattaches) de 6 à 24 aligneurs par arcade pour une DDM modérés (3 à 5 mm), un décalage sagittal de cl 2 ou cl 3 < de 2 mm avec la possibilité d'ajouter une traction intermaxillaire par élastique.

Nous conseillons une réévaluation par empreinte en silicone ou numérique à la moitié du traitement pour les traitements d'une durée supérieur à 10 mois (sans frais supplémentaires).

Les aligneurs sont fabriqués et envoyés par séquence de 10 sauf demande particulière ou mouvement moins prévisible (torque, rotation).

Toutes les dents peuvent être bougées et la forme des arcades peut être modifiée selon vos prescriptions.

Tous les mouvements ne pouvant se faire en même temps, ils sont organisés en séquences, sans limite dans le nombre d'étape dans chaque séquence.

Chaque Setup est fait par un praticien ayant un exercice exclusif en orthodontie, et vous sera envoyé sous format numérique dynamique accompagné d'un rapport détaillé des mouvements dentaires.

Fonctionnement

Dans le cas où vous nous adressez des empreintes en silicone

- Les empreintes doivent être récentes
- Par souci de préserver la qualité et la précision des résultats, les duplicatas d'un modèle en plâtre ne seront pas acceptés
- Enregistrez l'occlusion à l'aide d'une cire ou de silicone
- Il est nécessaire de fournir des photos intrabuccales (face, profil droit et gauche, occlusale maxillaire et mandibulaire) et exobuccales (face, face avec sourire et profil) doivent être fournies sous format **JPEG**
- Imprimez le bon de commande téléchargeable sur le site et joignez-le aux enregistrements
- Adressez-nous le tout par voie postale à l'adresse suivante :

Fab Lab Ortho
17 avenue Alain Peyrefitte
77160 Provins

Vous recevrez un mail de confirmation de notre part dès la réception de votre commande.

Dans le cas où vous nous adressez des fichiers numériques

Remplissez le bon de commande et transférez vos fichiers via notre site sous format **STL** pour l'empreinte numérique brute ou scannée et les photos intrabuccales (Face, profil droit et gauche, occlusale maxillaire et mandibulaire) et exobuccales (face, face avec sourire et profil) doivent être fournies sous format **JPEG**

Vous recevrez un mail de confirmation de notre part dès la réception.

Délai

Le délai moyen de la réalisation de votre Setup numérique et sa mise à votre disposition est de **15 jours** ouvrables après la réception de l'empreinte silicone/numérique, ainsi que les photos et l'enregistrement de l'occlusion cire/silicone/numérique.

Tarif

	1 à 2 séquences			3 à 4 séquences		
	Prix HT	TVA 20 %	Prix TTC	Prix HT	TVA 20 %	Prix TTC
1 arcade	50.00 €	10.00 €	60.00 €	100.00 €	20.00 €	120.00 €
2 arcades	75.00 €	15.00 €	90.00 €	150.00 €	30.00 €	180.00 €

NB : Si vos porte-empreintes ne sont pas jetables nous vous les retournons à vos frais.

Étiquette à coller sur l'emballage

Expéditeur :

Date commande

N° commande

Destinataire :



Fab Lab Ortho

17 Avenue Alain Peyrefitte

77160 Provins



Exemplaire à conserver

Expéditeur :

Date commande

N° commande

Destinataire :

Fab Lab Ortho

17 Avenue Alain Peyrefitte

77160 Provins



Conditions générales de vente :

CGV et d'utilisation du site internet de la société Fab Lab Ortho sarl, l'utilisateur accepte sans aucune réserve les conditions suivantes :

- **Description de la société :**

Fab Lab Ortho conçoit et fabrique des dispositifs médicaux sur mesure destinés à aider les chirurgiens-dentistes ou autres professionnels de santé à réaliser un traitement orthodontique.

- **Description des services du Fab Lab Ortho :**

Fab Lab Ortho réalise une étude et une planification d'un traitement orthodontique par des chirurgiens-dentistes ayant une activité exclusive en orthodontie, et fabrique des modèles et gouttières d'alignement ou de contention dentaire dans un but thérapeutique.

Ces dispositifs sont fabriqués en France dans les locaux du laboratoire Fab Lab Ortho avec des matériaux biocompatibles autorisés en France et tracés sur toute la chaîne de fabrication.

- **Protection des données :**

Le stockage des données personnelles et médicales est sécurisé sur les serveurs du Fab Lab Ortho, et l'utilisation du site de la société est considéré comme acceptation sans aucune réserve de ce transfert. Ces données seront conservées sans limite de durée et ne seront utilisées que pour fabriquer des systèmes orthodontiques sans aucune exploitation pour un objet de Marketing.

- **Responsabilité et garantie :**

Toute décision relative au diagnostic, plan de traitement et l'utilisation des dispositifs conçus par Fab Lab Ortho est sous l'entière responsabilité du chirurgien-dentiste qui est le seul responsable de la décision de l'utilité et l'utilisation des systèmes proposés par Fab Lab Ortho.

Le chirurgien-dentiste dégage Fab Lab Ortho de toute responsabilité en cas d'une utilisation inapproprié ou modification des dispositifs fabriqués par ce dernier, ainsi que la non obtention des résultats désirés.

- **Droits d'utilisation du site et des produits Fab Lab Ortho :**

Il est strictement interdit de copier, reproduire, diffuser ou revendre tout système conçu par Fab Lab Ortho sans l'autorisation préalable de ce dernier.

Le contenu du site est la propriété entière du Fab Lab Ortho et l'utilisation est strictement personnelle.

Le site peut contenir des liens d'autre ressources électroniques, Fab Lab Ortho n'exerce aucun contrôle sur ces sites et l'utilisateur en sera le seul responsable.

- **Risques éventuels :**

Comme tout autre traitement orthodontique, l'utilisation des services proposés par Fab Lab Ortho peut s'accompagner de certains risques pour lesquels le chirurgien-dentiste est tenu responsable d'informer le patient et d'avoir son consentement par écrit.

- **Délais de fabrication :**

Pour la plupart de nos services, le délai moyen pour réaliser votre commande est de 5 jours ouvrables après la réception du bon de commande sauf pour un Setup numérique, le délai de 15 jours ouvrables sera nécessaire pour sa mise à votre disposition. La fabrication d'une séquence d'un traitement par aligneurs nécessite 10 jours ouvrables. Ces délais sont à titre informatif et peuvent être modifiés en fonction des périodes estivales ou des retards de livraison en dehors de la volonté du Fab Lab Ortho.

- **Annulation de commande :**

Toute commande passée sur le site est considérée comme définitive après avoir reçu les modèles en plâtre, l'empreinte numérique ou après l'envoi du Setup numérique. Aucun remboursement ou avoir n'est possible après la validation du bon de commande.

- **Prix :**

Les prix proposés par Fab Lab Ortho pour chaque service peuvent être modifiés sans préavis préalable et l'utilisateur du site est amené à les consulter régulièrement.

- **Livraison :**

Vos commandes seront envoyées par Colissimo, sauf dans le cas où vous préférez un autre transporteur. Dans ce cas, des frais supplémentaires vous seront facturés séparément.

Le prix de chaque livraison est donné avant la validation de chaque commande.

Fab Lab Ortho décline toute responsabilité d'un retard de livraison dû au transporteur.

- **Paiement :**

Chaque utilisateur du site est invité à créer un compte utilisateur qui va être vérifié par voie téléphonique et/ou électronique. Pour chaque utilisateur une facture mensuelle électronique sera éditée pour toute commande concernant la numérisation, soclage, impression 3D et thermoformage, sauf dans le cas d'un traitement par aligneurs, l'étude de la faisabilité est gratuite mais le Setup et la fabrication des aligneurs vous seront facturés pour chaque cas envoyé.

Vous pouvez effectuer le règlement par chèque payable en France en une seule fois dans les 30 jours qui suivent la date d'émission de la facture.

Aucun règlement partiel ou en plusieurs fois n'est autorisé.

Le paiement est considéré comme effectif à l'encaissement immédiat ou différé du chèque.

- **Litiges :**

Les présentes conditions générales de vente et d'utilisation ainsi que la relation entre l'utilisateur du site et Fab Lab Ortho seront régis conformément aux lois de la France.

Tout litige ou désaccord avec ces conditions sera examiné et arbitré aux tribunaux français.

- **Modifications des conditions générales de vente :**

Fab Lab Ortho peut modifier les présentes conditions à tout moment sans en informer l'utilisateur du site, de ce fait il est nécessaire de les consulter avant chaque commande.